

uroclean®men rt

Pflege-Hinweise

- Das **uroclean®men rt Shuttle** sollte täglich mit heißem Wasser gereinigt werden.
Tipp: Stopfen mit heißem Wasser übergießen und in einem Sieb auffangen.
- Die Shuttles niemals mit herkömmlichen Reinigungsmitteln säubern. Die Haftreibung und Elastizität des Silikons kann dadurch stark beeinträchtigt werden.
- Die Shuttles keiner längeren UV-Strahlung aussetzen.

Gefahren-Hinweise

- Das Set ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Bei den Kleinteilen des Systems besteht Verschluckungsgefahr (gelbe Stopfen).
- Die **uroclean®men rt Shuttles** sind außerhalb der Reichweite von Haustieren aufzubewahren. Hier besteht die Gefahr, dass die Shuttles durch einen Biss des Tieres ihre Funktion verlieren und zudem gefressen werden könnten.
- Die zu dem System benötigten Bett- und Beinbeutel dürfen nicht länger als vom Hersteller empfohlen verwendet werden. Durch aufsteigende Keime besteht sonst die Gefahr einer Infektion.
- Bei Patienten, welche nicht bei vollem Bewusstsein sind, muss der Sitz des Shuttles regelmäßig kontrolliert und das Shuttle muss belüftet oder entlüftet werden.
- Durch spitze Gegenstände, z.B. lange Fingernägel, besteht die Gefahr der Beschädigung der Silikon-Shuttles.
- Bei Harnverhalt und größerer Restharnbildung kann das System nicht verwendet werden, da sich die Blase nicht vollständig entleert.
- Für demenzkranke Menschen empfehlen wir unser System nicht.

uroclean® GmbH
Vertriebsbüro
Industriestraße 15
77833 Ottersweier, Deutschland
Fon +49.7853.88.40
Fax +49.7853.88.627
info@uroclean.eu
www.uroclean.eu

Shuttle rt



Verschlussstopfen



Spülspritze



Montagehilfe

uroclean®men rt

uroclean® GmbH
Bodersweierer Straße 30
77694 Kehl, Deutschland

Fon +49.7853.88.40
Fax +49.7853.88.627
info@uroclean.eu
www.uroclean.eu

Anwendungs- Hinweise