

uroclean®men

Pflege-Hinweise

- Das **uroclean®men** Shuttle sollte täglich mit heißem Wasser gereinigt werden.
Tipp: Stopfen mit heißem Wasser übergießen und in einem Sieb auffangen.
- Die Shuttles niemals mit herkömmlichen Reinigungsmitteln säubern.
Die Haftreibung und Elastizität des Silikons kann dadurch stark beeinträchtigt werden.
- Die Shuttles keiner längeren UV-Strahlung aussetzen.



Gefahren-Hinweise

- Sollte das **uroclean®men** Shuttle ohne Unterhose oder Hüftgürtel getragen werden, besteht die Gefahr, dass sich das Shuttle im Ruhezustand des Körpers vom Penis abstreift, da sich die Muskulatur des gesamten Körpers in dieser Phase entspannt.
- Das Set ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Bei den Kleinteilen des Systems besteht Verschluckungsgefahr (gelbe Stopfen).
- Die **uroclean®men** Shuttles sind außerhalb der Reichweite von Haustieren aufzubewahren.
Hier besteht die Gefahr, dass die Shuttles durch einen Biss des Tieres ihre Funktion verlieren und zudem gefressen werden könnten.
- Die zu dem System benötigten Bett- und Beinbeutel dürfen nicht länger als vom Hersteller empfohlen verwendet werden. Durch aufsteigende Keime besteht sonst die Gefahr einer Infektion.
- Bei Patienten, welche nicht bei vollem Bewusstsein sind, muss der Sitz des Shuttles regelmäßig kontrolliert und das Shuttle muss belüftet oder entlüftet werden.
- Durch spitze Gegenstände, z.B. lange Fingernägel, besteht die Gefahr der Beschädigung der Silikon-Shuttles.
- Bei Harnverhalt und größerer Restharnbildung kann das System nicht verwendet werden, da sich die Blase nicht vollständig entleert.
- Für demenzkranke Menschen empfehlen wir unser System nicht.


uroclean® GmbH
Vertriebsbüro
Industriestraße 15
77833 Ottersweier,
Deutschland
Fon +49.7853.88.40
Fax +49.7853.88.627
info@uroclean.eu
www.uroclean.eu

© SEP 0023/9038


Shuttle

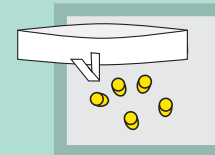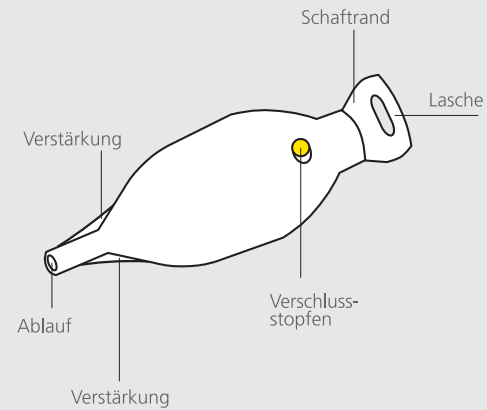


Hüftgürtel
Verschlussstopfen

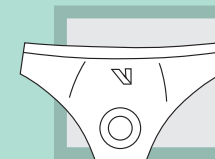

Unterhose

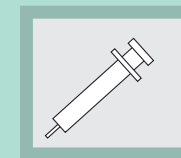

Spülspritze

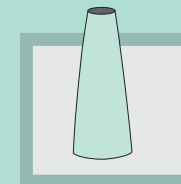

Montagehilfe

uroclean®men

uroclean® GmbH
Bodersweierer Straße 30
77694 Kehl, Deutschland

Fon +49.7853.88.40
Fax +49.7853.88.627
info@uroclean.eu
www.uroclean.eu

Anwendungs- Hinweise